



Caratteristiche Tecniche

Descrizione Prodotto	SPRAY NASALE ActiMaris®
<p>Descrizione</p>  	<p>1. Profilo Prodotto</p> <p>È una soluzione ipertonica di acqua marina ionizzata e alcalina, contenente NaCl 1,2%, sodio ipoclorito NaOCl (0,04%) e acido ipocloroso HOCl (0,004%); agisce su base biofisica.</p> <p>Il sale marino e l'ipoclorito di sodio creano un effetto antinfiammatorio e antimicrobico.</p> <p>ActiMaris® Spray NASALE idrata e deterge interagendo con la mucosa nasale, rispettandone la naturale fisiologia grazie alla composizione in minerali, sali e oligoelementi.</p> <p>Grazie alla sua ipertonicità / iperosmolarità, la soluzione ha un effetto decongestionante, dissolve la placche e le secrezioni nasali, liberando la respirazione. Grazie al suo effetto detergente e alla dissoluzione delle secrezioni, ActiMaris® Spray NASALE migliora la sensazione di benessere ed allevia i sintomi tipici della congestione nasale.</p> <p>ActiMaris® Spray NASALE è un antimicrobico efficiente e veloce.</p> <p>Il sale marino e l'ipoclorito di sodio sono conservanti naturali e garantiscono una lunga stabilità della soluzione nasale.</p> <p>Lo spray NASALE ActiMaris® non contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cortisone • xilometazolina • alcool • antibiotico <p>2. INDICAZIONI D'USO</p> <p>ActiMaris® Spray NASALE è adatto in aggiunta e come supporto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinite / raffreddore • Infezioni influenzali • Infiammazione acuta e cronica della mucosa nasale (rinite acuta e cronica) • Sinusite acuta e cronica (rino-sinusite acuta e cronica) • Rinite medicamentosa dopo abuso di spray nasali simpaticomimetici • Rinite allergica (anche profilassi) • Infezioni da catarro / orecchio medio del tubo • Post-operatorio (dopo interventi chirurgici al naso) • Profilassi dei germi resistenti MRSA / VRE • Profilassi dell'infiammazione del tratto respiratorio inferiore (riduce la flebo post-nasale)

Specifiche						
Preparazione	Aspetto	PH	Informazioni di sicurezza	Controindicazioni	Interazioni	Smaltimento
Soluzione pronta all'uso	La soluzione è già pronta all'uso; appare come un fluido chiaro con un odore caratteristico.	Ø 8.5	Non deve essere mescolato con altre soluzioni contenenti sostanze attive come iodio, biguanidi o argento. Va applicato solo sulle mucose dei tratti specificati (nasale) e secondo i quantitativi indicati. Va tenuto fuori dalla portata dei bambini.	Non utilizzare in caso di dichiarate e/o sospette allergie ad uno dei componenti.	Non usare insieme a: - Altri spray nasali - Soluzioni contenenti argento, iodio o biguanide	Può essere smaltito in qualsiasi sistema di acque reflue (lavandino).

Dimensioni					
Numero Oggetto	Volume Totale	Dosaggio	Unità di Vendita	GTIN (bottiglia)	Unità per Confezione
33020	20 ml	100 µl	1 pezzo	7649989411013	80 pezzi

Composizione
Contiene sale marino 1,2 % (Sal Maris), NaOCl 0,04 % e HOCl 0,004 %.

Metodo di conservazione
Conservazione: Deve essere conservato a temperatura ambiente tra +5 ° e +25 ° C. Va protetto dalla luce solare diretta.
Durata di utilizzo: La confezione integra ha durata di 30 mesi. La data di scadenza si trova sulla confezione.

Scadenza	Classificazione	Prodotto da
2,5 anni	Class I acc. to EU directive 93/42 EWG CE	ActiMaris AG Sandgrube 29 + 9050 Appenzell SWITZERLAND Tel.: +41 71 505 75 25 Fax: +41 71 505 75 24 www.actimaris.com info@actimaris.com